



- Rótulo da embalagem primária (fabricante):

DIALESTERIL Neonatal

Cód. Produto: F00000062

Equipo de transferência do líquido de diálise do frasco através do cateter para a cavidade abdominal.

Contém 01 unidade.
Descartável atóxico, estéril e isento de pirogênio.

“Artigo Médico-Hospitalar de Uso Único”.
“Destruir após o uso”.
“Proibido Reprocessar”.

Instruções de Uso:

1. Conectar o equipo Dialesteril ao (s) frasco ou bolsa (s) com solução de diálise peritoneal.
2. Conectar a via do paciente ao cateter.
3. Infundir a solução e no momento próprio, fazer a drenagem e reiniciar o tratamento em seguida.

Utilizar segundo as instruções.

Conservar em temperatura ambiente e em local protegido da umidade.
Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
Processo de esterilização: Gás Óxido de Etileno.

Reg. ANVISA: 80133950052

Registrado, Fabricado e Distribuído por:



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care Ltda.
Rua Amoreira, 891 - Bairro Roseira
CEP 13917-472 - Jaguariúna - SP
C.N.P.J. 01.440.590/0001-36
Indústria Brasileira
Farm. Resp.: Wagner Hirata
CRF-SP 23.795
SAC: 08000 12 34 34

Equipo de transferencia de líquido de diálisis de la bolsa a través del catéter para la cavidad abdominal.

Contenido 01 unidad.
Descartable, atóxico, estéril y libre de pirógenos.

“Artículo Médico-Hospitalario de un solo uso”.
“Destruir después de su uso”.
“Prohibido Re-esterilizar”.

Instrucciones de uso:

1. Conecte el equipo Dialesteril Neonatal a la bolsa con solución de diálisis peritoneal.
2. Conectar a la línea del catéter del paciente.
3. Infundir la solución y luego de la permanencia propicia, realizar el drenaje y repetir el tratamiento en seguida.

Utilizar según las instrucciones:

Conservar a temperatura ambiente y en un lugar protegido de la humedad.
No utilizar si el embalaje está dañado.
Método de esterilización: Gas Óxido de Etileno.

Importado por:

Fresenius Medical Care del Perú S.A.
Av. Javier Prado Oeste N° 2442, Int. 801 y 901, Urb. Orrantia,
Magdalena del Mar, Lima, Perú. R.U.C. N°: 20462793791.
D.T. Juan Olivares. R.S. N° DM4907E



7 898137 454004

Rev. 03