

Folha suplementar às Instruções de Uso do Adaptador Luer Lock para Cateter

Edição: 10.2018
Código: 6 957601/4

**Informação suplementar às Instruções de Uso do Adaptador Luer Lock
para Cateter, edição 10.2018.**

Adaptadores

Contém 01 unidade.

Descartável atóxico, estéril e isento de pirogênio.
O fabricante recomenda o uso único.

Dizeres Legais

Detentor de Registro:
Fresenius Medical Care Ltda
Rua Amoreira, 891, Jardim Roseira.
Jaguariúna / SP - CEP: 13917-472
Responsável Técnico: Wagner Hirata - CRF-SP: 23.795
Registro ANVISA nº: 80133950069
SAC: 0800-0123434

Instructions for use

Catheter Adaptor Luer-Lock

with Closure Cap for Peritoneal Dialysis

pt **Instruções de utilização**
Adaptador de Cateter Luer-Lock com cápsula de fecho para Diálise Peritoneal





**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care AG
61346 Bad Homburg, Germany
☎ +49 6172 609-0

CE 0123

Art.-Nr. 6 957601/4
10.2018

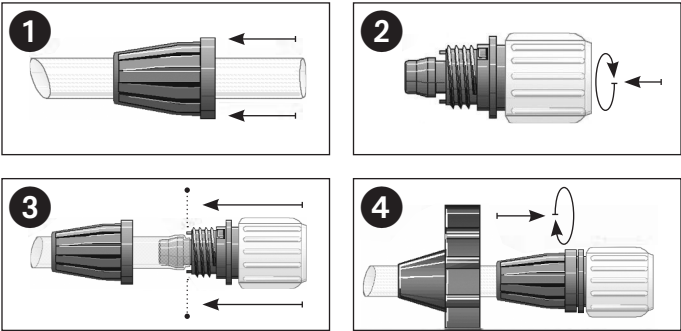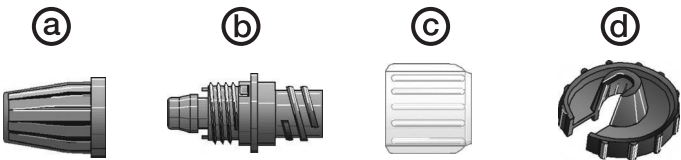

	Data de validade
	Lote
	Data de fabrico
	Unidades
 +5°C +30°C	Temperatura de armazenagem
STERILE EO	Estéril: Esterilizado a óxido de etileno
LOT	Consultar as instruções de utilização
REF	Número de encomenda
	Utilização única
	Sem látex

pt

Indicação

O campo de aplicação é a diálise peritoneal. O Adaptador de Cateter Luer-Lock deve ser conectado à parte abdominal externa de um cateter peritoneal. É especialmente desenhado para a conexão a qualquer Extensão de Cateter *stay•safe®* Luer-Lock.

Contraindicações

São aplicáveis as contraindicações usualmente documentadas para a diálise peritoneal. Os pacientes hiper sensíveis ao ETO podem, em raras circunstâncias, apresentar uma reacção alérgica.

Materiais

PVDF, Pebax. Todos os componentes são isentos de látex e esterilizados a ETO.

Especificação

Descrição dos componentes:

- (a) Porca de união
- (b) Adaptador de Cateter
- (c) Cápsula de fecho
- (d) Dispositivo aparafusador Luer-Lock: Para facilitar o aperto

- Embalagem: Embalagem dupla para bloco operatório.
- O Adaptador de Cateter Luer-Lock é destinado para uso permanente. Substituir só se estiver danificado.

Precauções

- Os procedimentos descritos nestas instruções não representam todos os protocolos clinicamente aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência e decisão do médico responsável.
- Usar somente se a embalagem exterior estiver intacta e sem danos. O produto não deve ser utilizado depois da data de validade (ver rótulo).
- Cumprir sempre a técnica asséptica.

Guias de orientação para colocação do dispositivo

- Empurrar a peça (a) no cateter de DP
- Apertar a peça (c) na peça (b)
- Empurrar o cateter contra a peça (b) até o tubo estar posicionado entre as duas peças
- Apertar a peça (a) firmemente na peça (b) possivelmente utilizando a peça (d)

Nota

- A conexão não pode ser desconectada novamente.
- A peça (b) é compatível com a Extensão de Cateter *stay•safe®* Luer-Lock ou com a peça (c)

Guias de orientação para substituir o adaptador de cateter (em caso de deterioração do cateter ou do adaptador de cateter)

Precaução

Substitua o adaptador só com o « abdómen cheio » e realize uma troca de solução imediatamente a seguir ao procedimento de substituição do adaptador.

1. Preparação

Antes de iniciar o procedimento, preparar a área de trabalho e juntar todos os materiais abaixo indicados.

Equipamento:

- adaptador de cateter embalado
- extensão de cateter embalada
- 1 tesoura ou bisturi esterilizado
- 1 clamp esterilizado
- 3 panos esterilizados (24 × 24)
- luvas esterilizadas
- 1 gaze acolchoada
- 1 kit de gaze esterilizado
- Iodopovidona
- 2 máscaras
- Dispositivo aparafusador Luer-Lock
- saco de solução de DP pré-aquecido na embalagem exterior

2. Torne acessível o adaptador e a extensão de cateter.

3. Higiene das mãos

- remova todas as peças de joalheria
- coloque uma máscara e peça ao paciente para colocar também
- proceda a uma lavagem cirúrgica das mãos

4. Preparação do equipamento

- abra 1 pano esterilizado e coloque em cima todo o equipamento estéril (adaptador de cateter, extensão de cateter nova, tesouras, clamp, luvas, 2 panos e dispositivo aparafusador – tudo esterilizado)
- abra o kit de gaze
- coloque a gaze acolchoada no kit de gaze e deite Iodopovidona na gaze acolchoada

5. Desinfecção do adaptador de cateter antigo

- coloque uma luva esterilizada
- cuidadosamente, levante a extensão de cateter do paciente com a mão sem luva
- pegue, com a mão enluvada, a gaze acolchoada saturada com Iodopovidona e enrole-a à volta do conector da extensão de cateter (adaptador antigo)

Deixe impregnar por aprox. 5 minutos.

- deslize o pano esterilizado por baixo e pouse a extensão de cateter
- agora, coloque a segunda luva esterilizada
- utilizando as tesouras esterilizadas, empurre a gaze acolchoada, clampando até ao cateter
- clamp o cateter de DP (a gaze protege o cateter)
- deslize um novo pano esterilizado por baixo do conector da extensão de cateter

Nota: No caso de alergia conhecida ao iodo, ou como alternativa ao procedimento com iodo, pode ser utilizado etanol a 80% para utilização médica.

6. Corte o cateter peritoneal exactamente abaixo do adaptador de cateter antigo e deite-o fora.

O novo adaptador de cateter deve ser montado como descrito anteriormente (1 – 4). Depois, deve ser conectada uma nova extensão de cateter ao adaptador.

7. Feche o clamp da nova extensão de cateter e proceda a uma troca de solução imediatamente a seguir.

8. Durante a drenagem pode ser realizado um procedimento de cuidado do orifício de saída.