

Dialesteril Neonatal

REF F00000062

Equipo de transferência

PROIBIDO REPROCESSAR

Indicação de Uso

Transferência do líquido de diálise do frasco ou bolsa através do cateter para a cavidade abdominal.

Contém 01 unidade.

Composição química: policloreto de vinila (PVC), polipropileno, polietileno, policarbonato e silicone.

Instruções de Uso

1. Conectar o equipo Dialesteril Neonatal ao(s) frasco ou bolsa(s) com solução de diálise peritoneal.
2. Conectar a via do paciente ao cateter.
3. Infundir a solução e no momento próprio, fazer a drenagem e reiniciar o tratamento em seguida.

 Fresenius Medical Care Ltda.

Rua Amoreira, 891, Roseira

Jaguariúna/SP - CEP: 13917-472

Responsável Técnico: Wagner Hirata - CRF/SP: 23.795

Registro ANVISA nº: 80133950052

SAC: 0800-0123434

PROHIBIDO RE-ESTERILIZAR

Indicación de Uso

Transferencia del líquido de diálisis del frasco o bolsa a través del catéter a la cavidad abdominal.

Contiene 01 unidad.

Composición química: policloruro de vinilo (PVC), polipropileno, polietileno, policarbonato y silicona.

Instrucciones de Uso

1. Conectar el equipo Dialesteril Neonatal al frasco(s) o bolsa(s) con solución de diálisis peritoneal.
2. Conectar a la línea del catéter del paciente.
3. Infundir la solución y luego de la permanencia propicia, realizar el drenaje y repetir el tratamiento en seguida.

Importado por:

Fresenius Medical Care del Perú S.A.

Av. Javier Prado Oeste N 2442, Int. 801 y 901,

Urb. Orrantia, Magdalena del Mar, Lima, Perú.

R.U.C. N° 20462793791, R.S. N° DM4907E.

