

PD-NIGHT SET PED 5 vias

REF 5020181BR

Equipo de transferência

PROIBIDO REPROCESSAR

Indicação de Uso: Transferência de Solução Polieletrólítica para Diálise Peritoneal - CAPD para o paciente através da cicladora PD-Night e transferência de dialisado para bolsa de drenagem.

Composição química: silicone, cloreto de polivinila, polipropileno, policarbonato, metacrilato de metila - acrilonitrila - butadieno - estireno, poliisopreno.

Instruções de Uso: Conectar as Bolsas de Drenagem ao equipo de transferência PD-NIGHT SET PED e este à máquina Cicladora PD Night, seguindo sempre as mensagens do painel da máquina e as instruções do Manual de Utilização desta, garantindo desta forma a perfeita instalação e completa segurança. Assegurar-se ainda de que todas as conexões estão corretamente encaixadas.

Descartável, atóxico e isento de pirogênio.
Artigo médico-hospitalar de uso único
Destruir após o uso.

Importado e Distribuído por:
Fresenius Medical Care Ltda.
Rua Amoreira, 891, Roseira.
Jaguariúna/SP - CEP: 13917-472
Responsável Técnico: Wagner Hirata – CRF/SP: 23.795
Registro ANVISA nº: 10322390028
SAC: 0800-0123434

Consulte o manual de instruções da máquina Cicladora PD Night, registro nº 80133950054:



BR200000219 - Rev. 03

 **FRESENIUS
MEDICAL CARE**